



サポートデスク ストレッチャータイプ (SPD-TANKA) 取扱説明書

可変式ディスプレイテーブル 非常搬送用ストレッチャー

このテーブルは緊急時、非常用ストレッチャーとして使用する事ができます。 特許第 6039125 号

はじめに、この度はTOKISEI商品“サポートシリーズ”のご購入ありがとうございます。
ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告

- ・あくまでも緊急時に救急車が入れる場所まで対象者を運ぶためのストレッチャーです。
- ・テーブルとしてご利用頂く場合は、設置場所があまりに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意

- ・緊急時に一旦取り外した天板部分は破損が無ければ再度取り付け可能です。背面の金具等をチェックし何度でもご利用下さい。
- 【重要】人を乗せるシート部分(ターポリン)は耐久年数があります(交換は販売元にお問合わせ下さい)




セット内容

はじめに、梱包内容が揃っているかをご確認下さい。

手順にそって組立を行っていきます。
組立の際には付属の六角レンチでボルトが動かなくなるまで締め込んで下さい。


また、本製品は防災機器としての機能を損なわない様定期的にビスの緩みやフレームの歪みなどをご確認頂く事をお願いいたします。

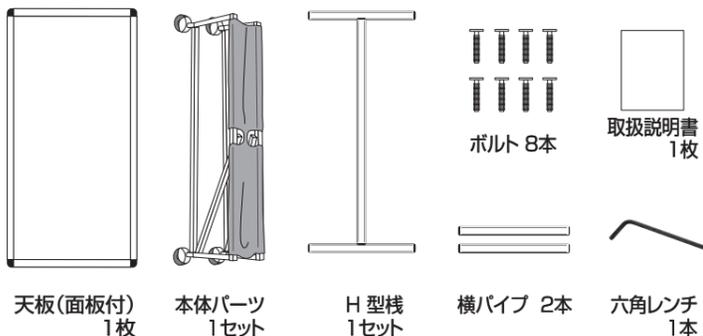


組立方法

【ご注意】フレームを組立てる際にパイプの向きにご注意下さい。(右図参照) 組立の際はボルトを付属の六角レンチで動かなくなるまで締め込んで下さい。 図:パイプには三辺に溝があり1辺だけ溝がありません。取り付けの際に向きをご確認下さい。


1 横パイプを片側から順番に①～④を取り付け、ボルトで固定します。取り付けできたら反対側を⑤～⑧の順にボルトで固定します。ボルトを締めるには付属の六角レンチを使用して下さい。

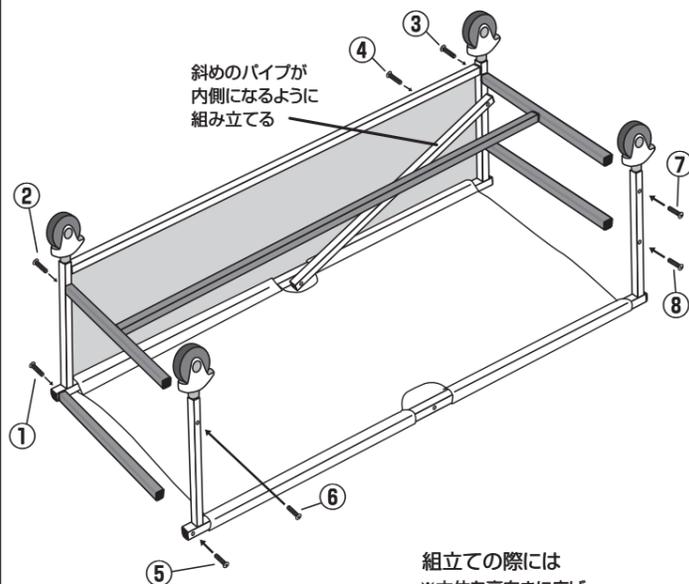

2 本体を返して、天板の向きに注意し3つの突起を必ずテーブル本体の溝に差し込んで下さい。

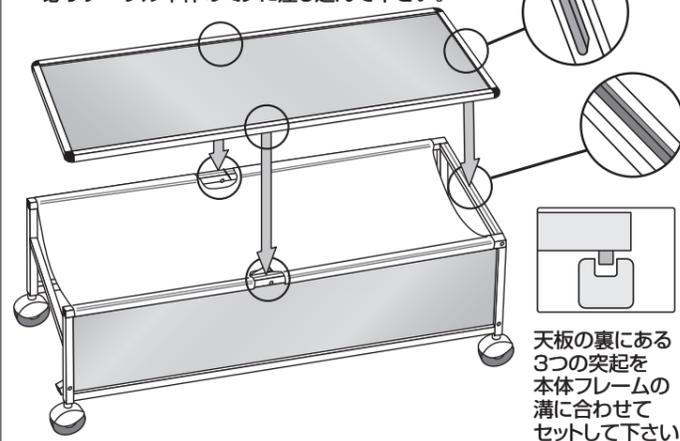

3 完成です。

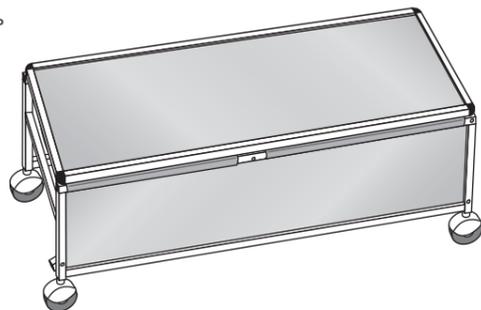

組立ての際には
※本体を裏向きに広げ各パイプを取り付けていきます。(シートの接着面が裏側です。)パイプの向きがずれている場合は図のように斜めのパイプが内側になるように回して下さい。

ストレッチャーとしてのご利用方法




天板を上持ち上げて外すと緊急時に非常用ストレッチャーとして活用して頂く事ができます。


変形方法を動画で確認
机からストレッチャーに変形するシーンを動画でご覧頂けます。(YouTubeが開きます)




天板パネルを外さず台車としても!!

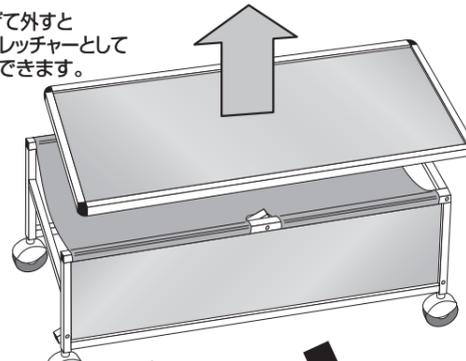

緊急時、ストレッチャーに!!

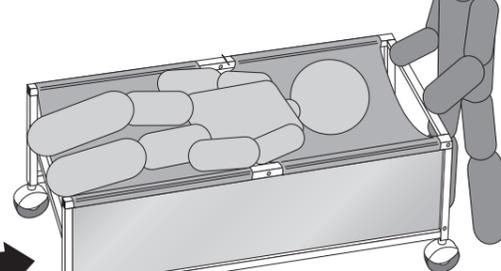

物資運搬に!!

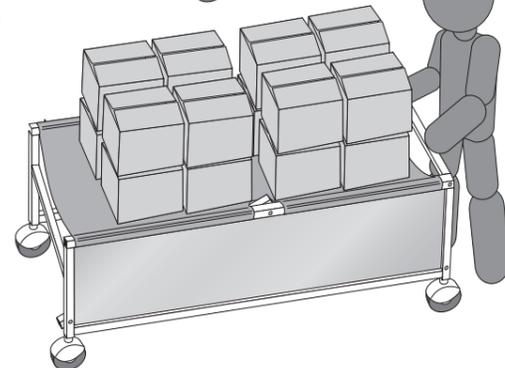

オプション商品

天板パネル (単品)

サポートテーブルストレッチャー用天板パネル部分の交換用になります。パネルフレーム材質 アルミ/B2 アルマイト

SPT天板パネル白
品番 SPT-PA150W


カラー化粧合板(白) パネルフレーム(シルバー)

SPT天板パネル黒
品番 SPT-PA150B

カラー化粧合板(黒) パネルフレーム(ブラック)

アクリルカバー付天板パネル

展示会用テーブルや販売用テーブルにご利用の場合に活躍するアクリルカバー付天板パネルです。

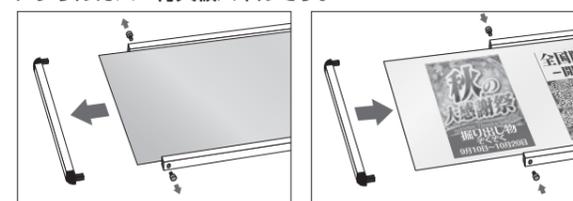

アルミ複合板(白/黒)とアクリル板が2枚セットになっていますので間にポスターや写真プライスカード等を挟んでご利用頂けます。

アクリル透明



ポスター・チラシ等
アルミ複合板(白/黒)

SPT天板パネルAC白/シルバー
品番 SPT-PA150ACW

SPT天板パネルAC黒/ブラック
品番 SPT-PA150ACB

側面板オリジナル

側面の板の材質は、アルミ複合板なので塩ビシート貼付け加工でオリジナルの側面デザイン加工ができます。

SPT側面板オリジナル
品番 SPT-SOKU-OG

完全データ入稿をお願いします。(詳細はお問合わせ下さい)



デザイン例



ご使用についてのごお願い

- ・担架、車いすの代用品として使用することで緊急時に時間を短縮し何か人助けをする事がテーブルにできないかと考えて作った商品です。あきらかに医師や救急隊員の判断が必要と思われる対象者には安静を守りむやみに移動させないで下さい。
- ・人の他に救援物資(水タンク等)を運ぶ際には、ターポリン素材の性質状、伸びる点等に考慮し積み方を注意して下さい

設置の際に

- ・いたずらで利用させない工夫を設置側のお客様で行って下さい。(利用時「声掛け必要!」の注意の貼り出しなど)
- ・皆様の助け合い思いやりの心で善意でご利用頂ける事を心よりお願い申し上げます。

販売元