



サポートサイン

ー サポートサイン 車いすタイプ(SPS-ISU-WB)取扱説明書 ー

可変式サインスタンド 非常搬送用車いす型スタンド看板

この看板は緊急時、非常用車いすとして使用する事ができます。 特許第 6039125 号

はじめに、この度はTOKISEI商品“サポートサイン”のご購入ありがとうございます。
ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



- ・あくまでも緊急時に救急車が入れる場所まで対象者を運ぶためのサポートする車いすです。使用案内のボードをごらん頂き正しくご利用下さい。
- ・看板としてご利用頂く場合は、設置場所がいきらかに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意




- ・緊急時に一旦取り外したパネル部分は破損が無ければ再度取り付け可能です。背面の金具等をチェックし何度もご利用下さい。
- 【重要】人に乗せるシート部分(ターポリン)は耐久年数があります(交換は販売元にお問合わせ下さい)




セット内容


はじめに、梱包内容が揃っているかをご確認下さい。

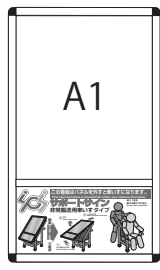


パネル(面板付)
使用方法案内板
1枚

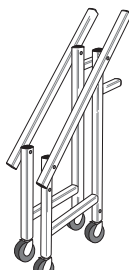

本体パーツ
左右セット

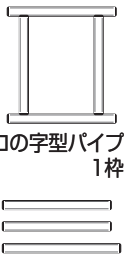

口の字型パイプ
1枚

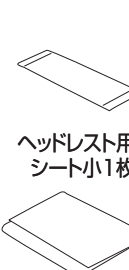


ヘッドレスト用
シート小1枚




座席用
シート大1枚




ボルト10本

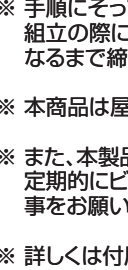


六角レンチ
1本

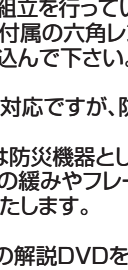


横パイプ
パイプ小 2本

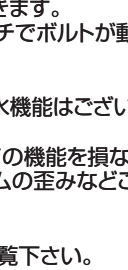

パイプ大 1本

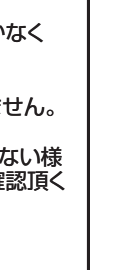

解説DVD
1枚

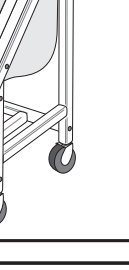

取扱説明書
1枚

- ※ 手順にそって組立を行っていきます。組立の際には付属の六角レンチでボルトが動かなくなるまで締め込んで下さい。
- ※ 本商品は屋外対応ですが、防水機能はございません。
- ※ また、本製品は防災機器としての機能を損なわない様定期的にビスの緩みやフレームの歪みなどご確認頂く事をお願いいたします。
- ※ 詳しくは付属の解説DVDをご覧ください。

組立方法

【ご注意】フレームを組立の際にパイプの向きにご注意下さい。(右図参照)
本体のパーツには左右があります。斜めのパイプが外側になるように配置し組立て、付属の六角レンチでボルトが動かなくなるまで締め込んで下さい。



図:パイプには三辺に溝があり1辺だけ溝がありません。取り付けの際に向きをご確認下さい。

① 口の字型パイプを取り付けボルトで固定します。

※本体パーツの向きに注意して下さい。斜めのパイプが外側

※向きに注意

② パイプ小2本を取り付けボルトで固定します。

※向きに注意

③ パイプ大を取り付けボルトで固定します。

※向きに注意

④ 2で取り付けたパイプ小にシートを通します。

※向きに注意
シートの接着面を下側にして通して下さい。

⑤ 反対側を取り付けボルトを締めます。

⑥ シート小を図の位置に取り付けます。

パイプに巻きマシックテープで留めます

⑦ 本体の完成です。

車いすとしてのご利用方法


詳しくは付属の解説 DVD をご覧ください。




パネルを取り付ければ
ホワイトボードスタンドとして
ご使用頂けます。




緊急時に非常用車いすとして
活用して頂く事ができます。

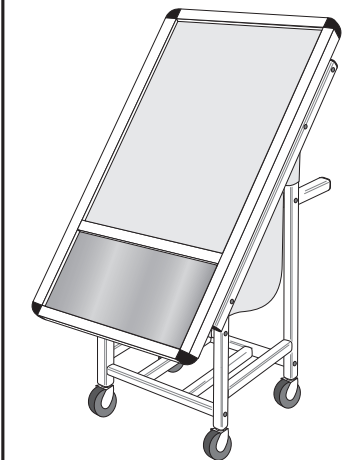


簡単
3STEP
で変身

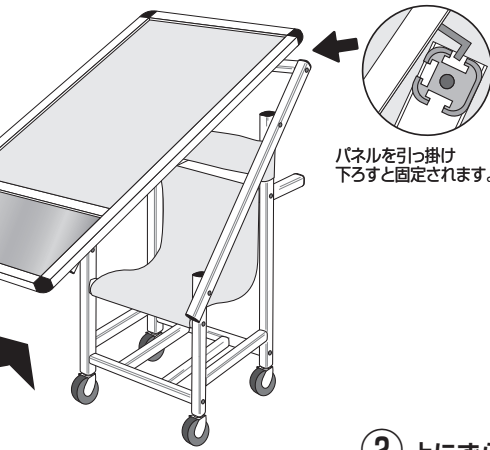

パネルを引っ掛け
下ろすと固定されます。

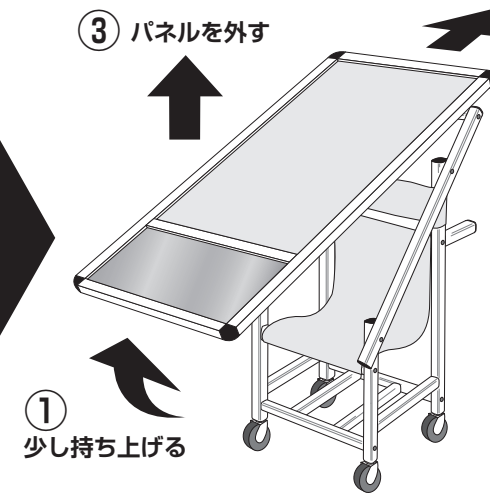

- ① 少し持ち上げる
- ② 上にずらす
- ③ パネルを外す

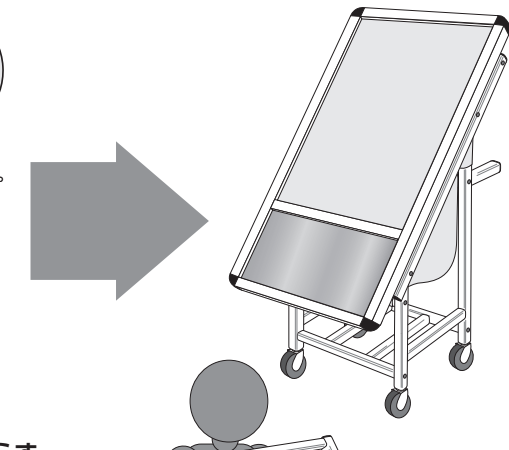

成人1名を
乗せる事が
できます。

変形方法を動画で確認

看板から車いすに変形する
シーンを動画でご覧頂けます。
(YouTubeが開きます)





面板の交換方法


パネルの上部は A1 サイズ (594mm×841mm) のホワイトボードとしてお使い頂けます。
下部の「使用方法案内板」も外して差し替える事ができます。変形サイズ (594mm×355mm 厚さ 3mm)



パネルから面板(ホワイトボード)を
取り外す手順です。
※交換する際も同じ手順で行います。

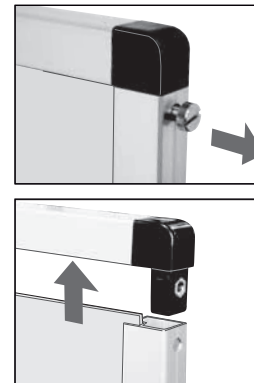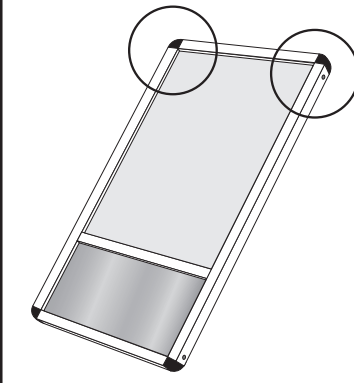

- 1) パネルフレーム上部の樹脂コーナーを止めている左右のビスを緩め取り外します。ビスを外したらフレームの上辺を上へ引き抜いて下さい。(ビスが固い場合はコインなどをご利用下さい。)

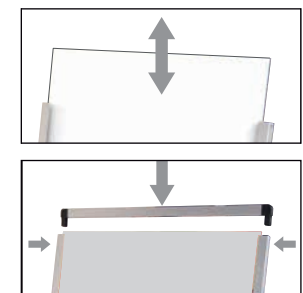

- 2) ネジを外した状態で フレームの上辺を引きあげ取り外します。
- 3) フレームの溝に沿ってホワイトボードをゆっくり降ろしてセットして下さい。
- 4) 面板セット後は上部フレームを戻して 両側をネジで固定します。

マーカーボードの取り扱い

ボードへ書き込む際は、必ず水性マーカーをご利用下さい。擦れて文字が消えてしまう防止対策に別売りのアクリル板をセットする事もできます。

面板のマーカーボードはマグネットを使用する事ができます。

- お手入れ方法
かるく水拭きしその後、乾拭きして下さい。



「使用方法案内板」も
差し替ええます。



- ご使用についてお願い
- ・担架、車いすの代用品として使用することで緊急時に時間を短縮し何か人助けをする事が看板にできないかと考えて作った商品です。あきらかに医師や救急隊員の判断が必要と思われる対象者には安静を守りむやみに移動させないで下さい。
 - ・人の他に救援物資(水タンク等)を運ぶ際には、ターポリン素材の性質状、伸びる点等に考慮し積み方を注意して下さい
- 設置の際に
- ・いたずらで利用させない工夫を設置側のお客様で行って下さい。(利用時「声掛け必要!」の注意の貼り出しなど)
 - ・皆様の助け合い思いやりの心で善意でご利用頂ける事を心よりお願い申し上げます。

販売元