



サポートキャリーストレッチャー脚部付きタイプ(SPC-TANKA)取扱説明書

折り畳み式キャスター付き担架

SUPPORT CARRY この商品は緊急時、非常搬送用ストレッチャーとして使用する事ができます。

はじめに、この度はTOKISEI商品“サポートキャリー”のご購入ありがとうございます。
ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告

- ・あくまでも緊急時に救急車が入れる場所まで対象者を運ぶためのストレッチャーです。
- ・100kgを大きく超える荷重の物を乗せないで下さい。
- ・がれき等鋭利なものはターポリンが裂ける恐れがあるため、乗せないで下さい。

注意

- 【重要】人を乗せるシート部分(ターポリン)は耐久年数があります(交換は販売元にお問合せ下さい)
- ・キャスター部を折りたたみ、ギアをロックした状態で保管してください。
- ・ストレッチャーに変形させる際は指づめに注意して下さい。
- ・使用しない時は、キャスターがある面を壁側にして転倒しないようにして保管して下さい。



耐荷重 100kg

ストレッチャーとしてのご利用方法



緊急時に非常搬送用ストレッチャーとして活用して頂く事ができます。

ストレッチャーへの変形方法

ストレッチャーに変形させる方法は、QRコードより動画でご覧頂けます。(YouTubeが開きます)



簡単3STEPで変身

① 4つのギアのロックを外し、4本の安全ピンを抜く

② 片側の車輪を立てて左右のギアをロックし安全ピンを差し込む

③ 反対側も同様に車輪を立て、ギアをロックし安全ピンを差し込む

倒す


約100kgまで搬送できます

キャスターのストッパーを解除します

※キャスターは4輪全てストッパー付きとなります。

セット内容

はじめに、梱包内容が揃っているかをご確認下さい。

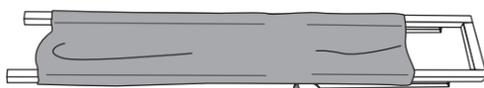

本体1セット



脚部パーツ1セット

K55(キャスター付)をお選び頂いた場合は、キャスターが予め脚部パーツにセットされた状態でお届けとなります。
※取り外し不可



六角レンチ1本



ボルト2本

手順にそって組立を行っていきます。
組立の際には付属の六角レンチでボルトが動かなくなるまで締め込んで下さい。

また、本製品は防災機器としての機能を損なわない様定期的にビスの緩みやフレームの歪みなどをご確認頂く事をお願いいたします。

組立方法

【ご注意】組み立てる際に脚部の向きにご注意下さい。
組立の際はボルトを付属の六角レンチで動かなくなるまで締め込んで下さい。



付属の六角レンチとボルトを使用して、脚部のパイプを取り付けます。



- ① 広い場所でキャスターがついている面を下にして設置します。
 - ② 脚部パーツを付属のボルト(取説の袋の中)で取り付けます。
- ※ 手で締めこんだ後、レンチで固く締めこんで下さい。



注意

コの字脚部

注意

取付の際は、脚部の向きにご注意ください

※コの字脚部の、開口している側を上に向けて取り付けして下さい。

脚部を開く際の指づめ注意



ギア付近



脚部を開く際は、必ずキャスター部のパイプを持って開閉してください。
ギア付近を持つと手や指を挟む可能性があり危険です。



良い例



悪い例

ご使用についてお願い

- ・あきらかに医師や救急隊員の判断が必要と思われる対象者には安静を守りむやみに移動させないで下さい。
- ・人の他に救援物資(水タンク等)を運ぶ際には、ターポリン素材の性質状、伸びる点等に考慮し積み方を注意して下さい

設置の際に

- ・いたずらで利用させない工夫を設置側のお客様で行って下さい。(利用時「声掛け必要!」の注意の貼り出しなど)
- ・皆様の助け合い思いやりの心で善意でご利用頂ける事を心よりお願い申し上げます。

販売元