



サポートサイン ストレッチャーショートタイプ (SPS-STANKA-AC) 取扱説明書

可変式サインスタンド 非常搬送用ストレッチャー型スタンド看板

サポートサイン この看板は緊急時、非常用ストレッチャーとして使用する事ができます。 特許第 6039125 号

はじめに、この度はTOKISEI商品“サポートサイン”のご購入ありがとうございます。
ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告

- ・あくまでも緊急時に救急車が入れる場所まで対象者を運ぶためのストレッチャーです。使用案内のボードをごらん頂き正しくご利用下さい。
- ・看板としてご利用頂く場合は、設置場所がしっかりと水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。


注意

- ・パネルのポスターを展示する部分は防水ではありません、屋外でご利用の際には耐水性のあるポスターを展示して下さい。
- ・緊急時に一旦取り外したパネル部分は破損が無ければ再度取り付け可能です。背面の金具等をチェックし何度もご利用下さい。
- 【重要】人に乗せるシート部分(ターポリン)は耐久年数があります(交換は販売元にお問合わせ下さい)



セット内容

はじめに、梱包内容が揃っているかをご確認ください。

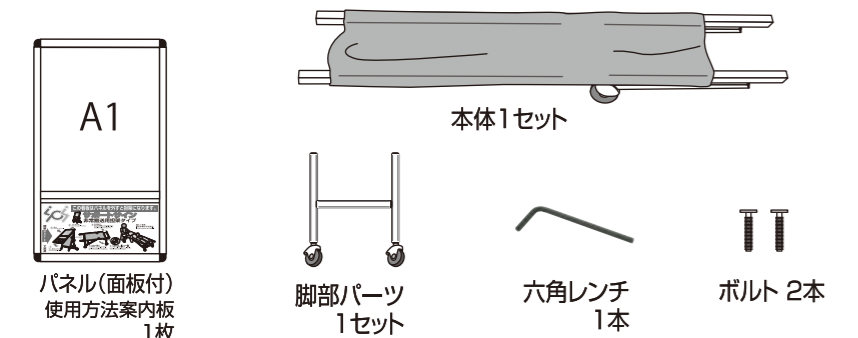

- ※手順にそって組立を行っていきます。組立の際には付属の六角レンチでボルトが動かなくなるまで締め込んで下さい。
- ※パネルに入れるポスター(印刷物)は付属しておりません別途ご用意下さい。
- ※本商品は屋外対応ですが、防水機能はございませんので屋外で使用される場合、セットされるポスター(印刷物)が雨など濡れる可能性がある場合は、耐水加工などを行ってご使用下さい。
- ※本製品はストレッチャーとしての機能を損なわない様定期的にビスの緩みやフレームの歪みなどご確認頂く事をお願いいたします。

組立方法

【ご注意】フレームを組立の際にパイプの向きにご注意下さい。(右図参照) 組立の際はボルトを付属の六角レンチで動かなくなるまで締め込んで下さい。 図:パイプには三辺に溝があり1辺だけ溝がありません。取り付けの際に向きをご確認ください。

- パイプを取り付け、ボルトで固定します。

※広い場所で脚部がある面を上にして設置します。
※本体に脚部パーツを同梱しているボルトで取り付けます。
※取付の際には、パイプの向きに注意してください。
- 取り付けした脚部を下にして本体を起します。
- 上部パイプの溝にひっかけるようにしてパネルを取り付けます。

ポスターの交換方法

パネルの上部は A1 サイズ (594mm×841mm) のポスター (印刷物) をセットする事ができます。下部の「使用方法案内板」も外して差し替える事ができます。変形サイズ (594mm×855mm 厚さ 3mm)

パネルにポスター(印刷物)をセットする手順です。
※交換する際も同じ手順で行います。

- パネルフレーム上部の樹脂コーナーを止めている左右のビスを緩め取り外します。ビスを外したらフレームの上辺を上へ引き抜いて下さい。(ビスが固い場合はコインなどをご利用下さい。)
- フレームを外した上側から、面板を引き上げてポスター(印刷物)をセットし、再び溝に合わせ差し込みます。
※パネルの溝には多少の余裕があるので複数枚のポスターを仕込んでおく事もできます。
- 面板、ポスター(印刷物)をセットしたらフレーム上辺に戻して差し込み左右をビスで固定します。
※ビスはしっかり締め、固定して下さい。
※パネル部分は防水ではありませんので、ポスターに耐水加工を施して下さい。
※「使用方法案内板」も差し替えます。

ストレッチャーとしてのご利用方法

緊急時に非常搬送用ストレッチャーとして活用して頂く事ができます。

簡単4STEPで変身

- パネルを手前に持ち上げ、上にスライドさせるようにして取り外します。
- 上側2本の安全ピンを抜き、2箇所のギアのロックを外す。
- 脚部を開きながら静かに倒します。
- 脚部が本体と直角になるようにしてギアをロックし、「②」で外したピンを差す。

約100kgまで搬送できます。

ストレッチャーへの変形方法

ストレッチャーに変形させる方法は、QRコードより動画でご覧頂けます。(YouTubeが開きます)

脚部を開く際の指づめ注意

脚部を開く際は、必ずキャスター部のパイプを持って開閉してください。ギア付近を持つと手や指を挟む可能性があり危険です。

ギア付近

良い例

悪い例

- ご使用についてお願い
- ・あきらかに医師や救急隊員の判断が必要と思われる対象者には安静を守りむやみに移動させないで下さい。
 - ・人の他に救援物資(水タンク等)を運ぶ際には、ターポリン素材の性質状、伸びる点等に考慮し積み方を注意して下さい
- 設置の際に
- ・いたずらで利用させない工夫を設置側のお客様で行って下さい。(利用時「声掛け必要!」の注意の貼り出しなど)
 - ・皆様の助け合い思いやりの心で善意でご利用頂ける事を心よりお願い申し上げます。