

サポートメッセージストレッチャー (SPM-TANKA-WB) 取扱説明書

可変式サインスタンド 非常搬送用ストレッチャー型スタンド看板

SUPPORT MESSAGE この看板は緊急時、非常搬送用ストレッチャーとして使用する事ができます。 特許第 6039125 号

はじめに、この度はTOKISEI商品“サポートメッセージ”のご購入ありがとうございます。ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告

- ・あくまでも緊急時に救急車が入れる場所まで対象者を運ぶためのストレッチャーです。使用案内のボードをごらん頂き正しくご利用下さい。
- ・看板としてご利用頂く場合は、設置場所があまりに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。


注意

- ・パネル部分は雨など濡れても大丈夫ですが防水性能はありません。
- ・緊急時に一旦取り外したパネル部分は破損が無ければ再度取り付け可能です。背面の金具等をご確認ください。
- 【重要】人に乗せるシート部分(ターポリン)は耐久年数があります(交換は販売元にお問合わせ下さい)



耐荷重 100kg


セット内容

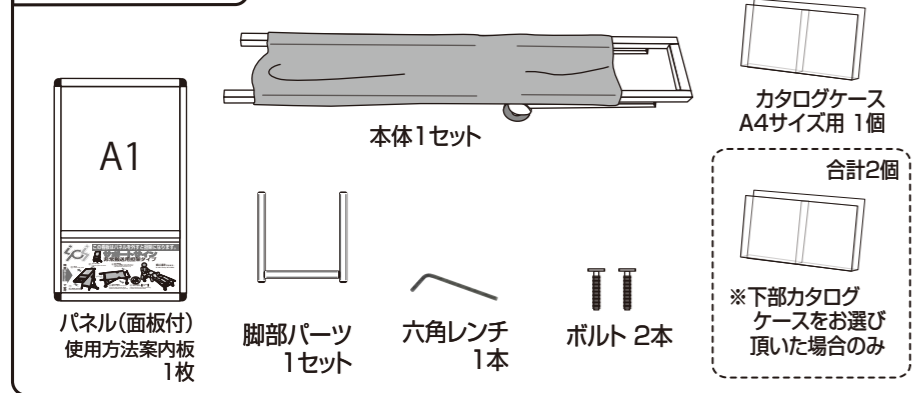



- ※手順にそって組立を行っていきます。組立の際には付属の六角レンチでボルトが動かなくなるまで締め込んで下さい。
- ※本製品は、直立型のスタイルの為、屋内での壁際に設置する事を推奨しております。やむなく屋外でご利用の場合は、強風などによる転倒防止として脚部に重りを置いてご使用ください。
- ※本製品はストレッチャーとしての機能を損なわない様定期的にビスの緩みやフレームの歪みなどをご確認頂く事をお願いいたします。

組立方法

【ご注意】組み立てる際に脚部の向きにご注意下さい。組立の際はボルトを付属の六角レンチで動かなくなるまで締め込んで下さい。

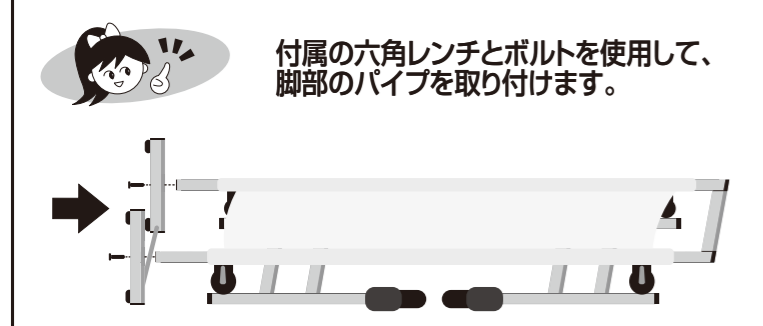

- ① 広い場所でキャスターがついている面を下にして設置します。
 - ② 脚部パーツを付属のボルト(取説の袋の中)で取り付けます。
- ※ 手で締めこんだ後、レンチで固く締めこんで下さい。

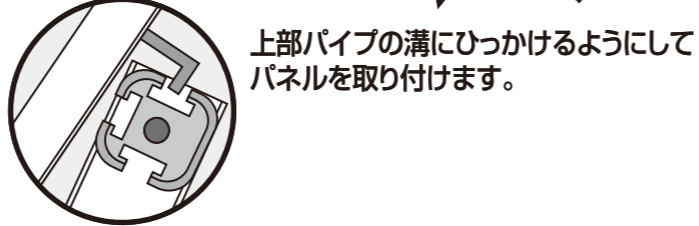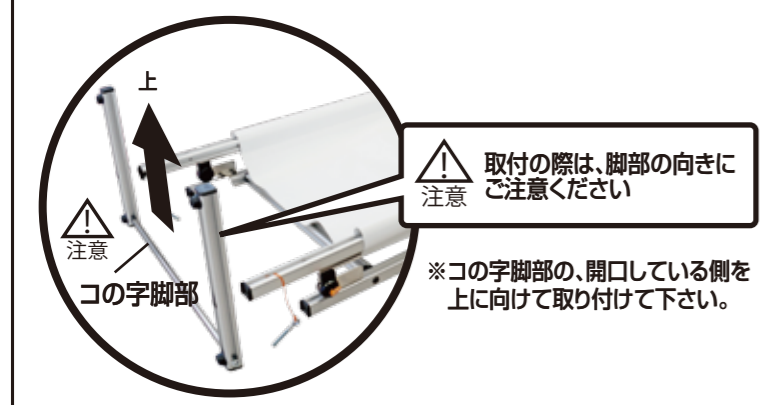

ストレッチャーとしてのご利用方法

緊急時に非常搬送用ストレッチャーとして活用して頂く事ができます。

簡単3STEPで変身

① パネルを外し本体を倒して4つのギアのロックを外し4本の安全ピンを抜く

ストレッチャーへの変形方法

変形方法を動画でご覧頂けます。(YouTubeが開きます)

② 片側の車輪を立てて左右のギアをロックし安全ピンを差し込む

③ 反対側も同様に車輪を立て、ギアをロックし安全ピンを差し込む

約100kgまで搬送できます

パネルの交換方法

パネルの上部はホワイトボード看板としてご利用頂けます。水性マーカーでの書き消し、マグネットの利用が可能です。

パネルから面板(ホワイトボード)を取り外す場合は次の手順で行います。

- 1) パネルフレーム上部の樹脂コーナーを止めている左右のビスを緩め取り外します。ビスを外したらフレームの上辺を上へ引き抜いて下さい。(ビスが固い場合はコインなどをご利用下さい。)

- 2) ネジを外した状態で フレームの上辺を引きあげ取り外します。
- 3) フレームの溝に沿ってホワイトボードをゆっくり持ち上げて下さい。(その際にホワイトボードの切り口にご注意下さい)

おすすめ オプションの亚克力板A1サイズをプラスするとポスター展示ができます。

※ ビスはしっかり締め、固定して下さい。

マーカーボードの取り扱い

ボードへ書き込む際は、必ず水性マーカーをご使用下さい。擦れて文字が消えてしまう防止対策に別売りの亚克力板をセットする事もできます。

● お手入れ方法
かるく水拭きしその後、乾拭きして下さい。

脚部を開く際の指づめ注意

注意 脚部を開く際は、必ずキャスター部のパイプを持って開閉してください。ギア付近を持つと手や指を挟む可能性があり危険です。

良い例

悪い例

ご使用についてのお願い

- ・あきらかに医師や救急隊員の判断が必要と思われる対象者には、安静を守りむやみに移動させないで下さい。
- ・人の他に救援物資(水タンク等)を運ぶ際には、ターポリン素材の性質状、伸びる点等に考慮し積み方を注意して下さい

設置の際に

- ・いたずらで利用させない工夫を設置側のお客様で行って下さい。(利用時「声掛け必要!」の注意の貼り出しなど)
- ・皆様の助け合い思いやりの心で善意でご利用頂ける事を心よりお願い申し上げます。